




Pukeminen




Umpikärkisille lääkinällisille tukisukille tarkoitettu pukemisen apuväline, jossa on ainutlaatuinen magneettinen kiinnitysmekanismi

Arion Magnide® tarjoaa helpon, turvallisen ja yksinkertaisen ratkaisun kaikille umpikärkisten lääkinällisten tukisukkien käyttäjille ja heidän apuna oleville. Tuotteen ainutlaatuisen liukuominaisuuden ja magneettisen kiinnitysmekanismin ansiosta voit nyt pukea ja riisua umpikärkiset kompressiotuotteet helposti. Arion Magnide® on laaja kokovalikoima, josta löytyy sopiva koko erikokoisiin jalkoihin. Tämä on erityisen tärkeää niille potilaille, jotka kärsivät alaraajojen turvotuksesta.

Ennen pukemisen aloittamista:






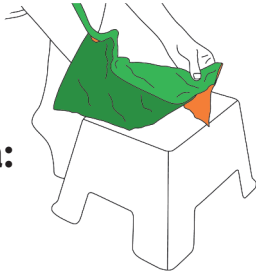


Tärkeää! Älä työnnä jalkaa Magnide® pätyyn asti, jätä päähän hieman tilaa

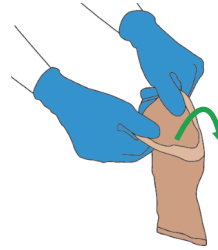


Mikäli kompressiotuotteessasi on silikonireuna, käännä se ulospäin

Pukemishjeet

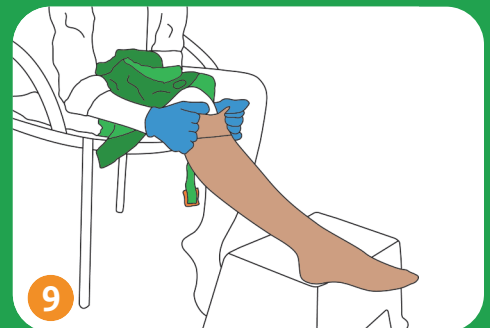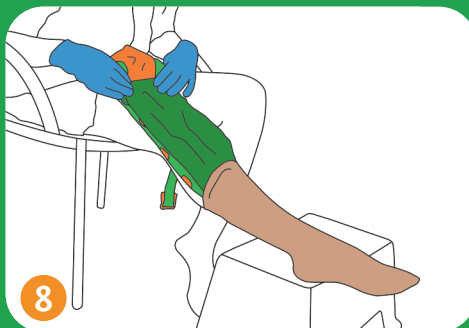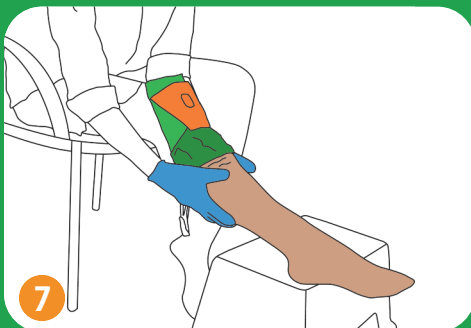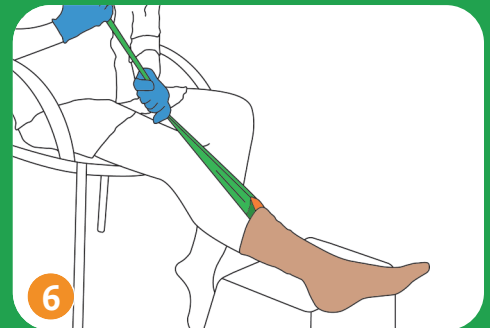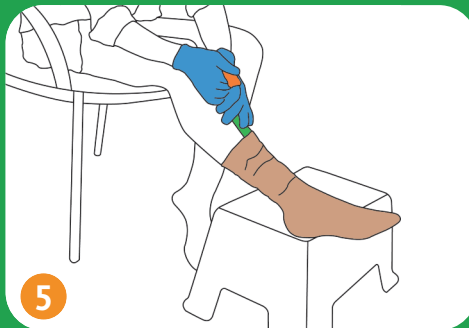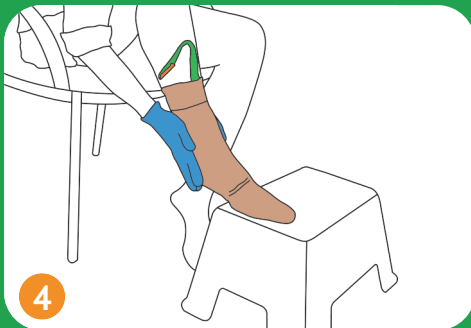


Kiinnitä lenkin yläosa Magnide®
yläosaan magneetin avulla

1

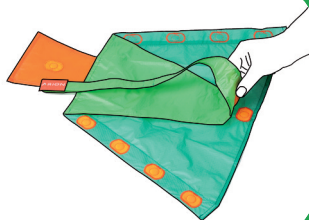


Käännä Magnide® ja aseta se
tasaiselle alustalle

2

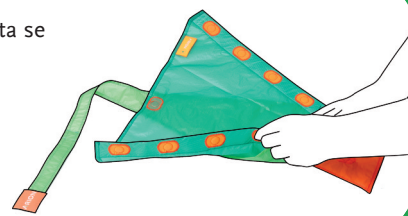


Taita molemmat vihreät sivut
keskelle. Oranssien magneettien
tulee olla kohdakkain
ja osua toisiinsa.

3

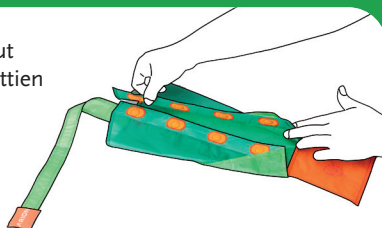

Sulje oranssi läppä (lähellä
varpaita) Magnide® yli siten,
että magneetit osuvat yhteen

4

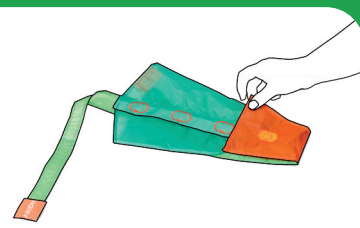

Kompressioterapia on tehty helpommaksi

Arionin apuvälineet kompressiotuotteiden pukemiseen ja riisumiseen

Helppo käyttää

- Minimoi kitkan kompressiotuotteen ja ihon väliltä
- Vähentää kompressiotuotteiden käyttäjän ja hänen apuna olevan henkilön fyysistä rasitusta
- Parantaa kompressiotuotteita käyttävän henkilön itsenäisyyttä

Turvallista käyttää

- Vähentää iho-ongelmien riskiä; erityisen hyödyllinen herkkäihoisilla ja jalkahaavojen yhteydessä
- Edistää kompressiotuotteiden käyttöikää suojaamalla sukkaa kynsiltä ja sormilta
- Auttaa säilyttämään sukan kompression pidempään ja ehkäisee kompressiotuotteen liialliselta venymiseltä

Yksinkertaiset ratkaisut

- Apuväline kaikenikäisille kompressiotuotteille: sukille, sukkahousuille, hihoille ja hanskoille
- Suunniteltu erimuotoisille ja -kokoisille raajoille
- Tukee kompressiohoidon sujuvuutta

Arion Magnide®

Koot

Tuote- koodi	Koko	Kengän koko	Kengän koko Naiset	Kengän koko Miehet
E01513	Medium	≤ 38	≤ 5,5	≤ 6
E01514	Large	39 - 43	6 - 8	6,5 - 9
E01515	X-Large	≥ 44	≥ 9	≥ 9,5

XL-koko sopii myös erityislevvään
jalkaan (ympärysmitta 28cm asti)



Mikäli tarvitset muita kokoja, Arion pystyy
yksilöimään tuotteita tarpeidesi mukaan.