





Pukeminen
+
Riisuminen

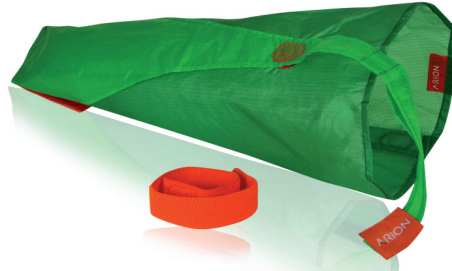


2in1 on pukemisen ja riisumisen apuväline umpikärkisille lääkinnällisille kompressiosukille ja -sukkahousuille ainutlaatuisella magneettikiinnityksellä

Arion Magnide® 2in1 tarjoaa kompressiovaatteiden helpon siirtämisen potilaan iholle ainutlaatuisen liukuominaisuuden ansiosta. Se tekee kompressiotuotteiden käytöstä turvallista ja helppoa minimoiden samalla niiden kulumista ja repeytymisriskiä. Arion Magnide® 2in1:n koot ovat joustavia sopien erikokoisiin raajoihin, Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun potilas kärsii alaraajojen turvotuksesta. Arion Magnide® 2in1 on yksinkertainen terveydenhuollon ammattilaisten suosittelema tuote kompressiotuotteiden käyttäjille käytettäväksi yhdessä kompressiohoidon yhteydessä.

Ennen pukemisen aloittamista:






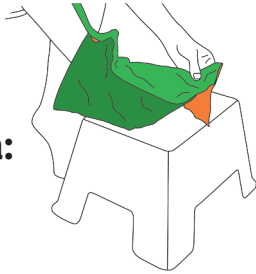


Tärkeää! Älä työnnä jalkaa
Magnide® pätyyn asti,
jätä päähän hieman tilaa






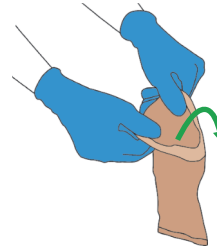


Mikäli kompressiotuotteessasi
on silikonireuna, käännä se
ulospäin


Pukemishjeet

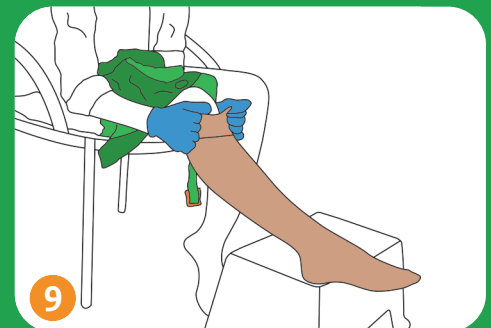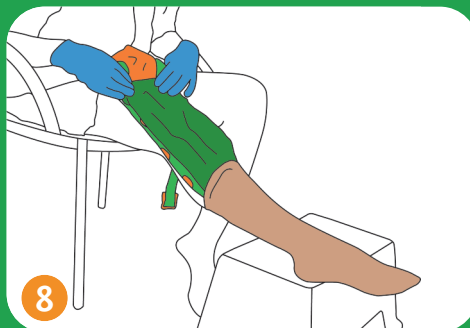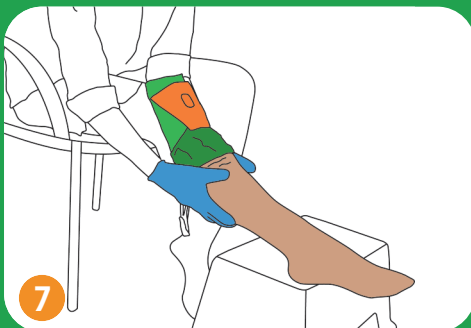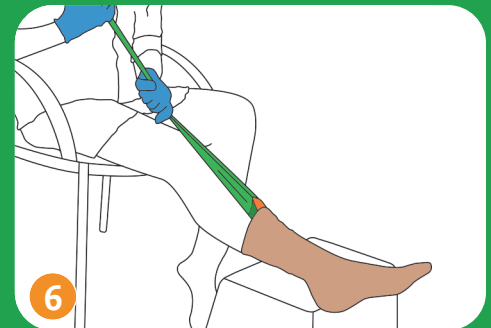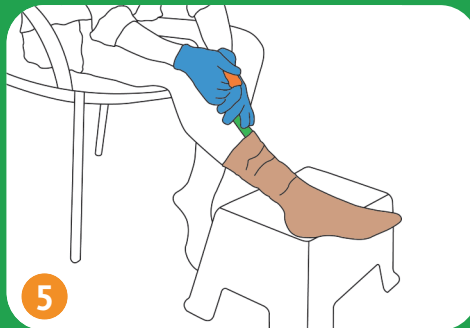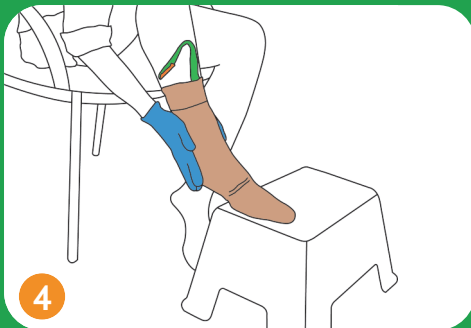


Riisumisen ohjeet

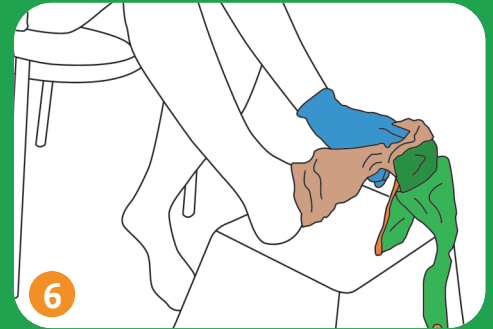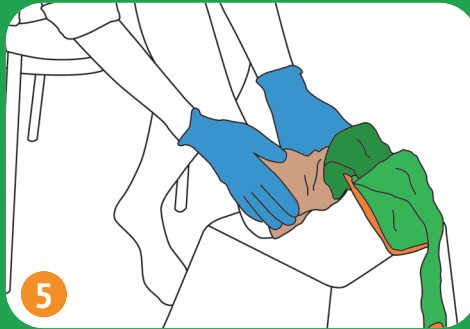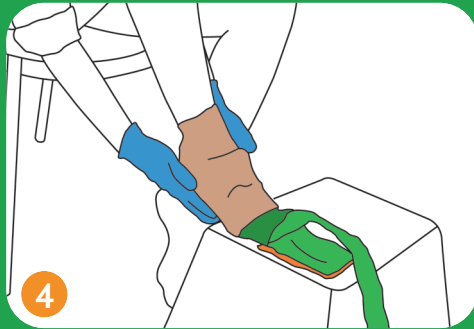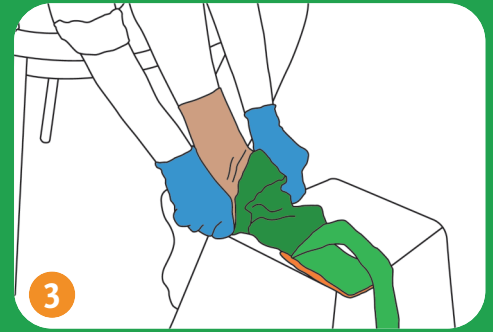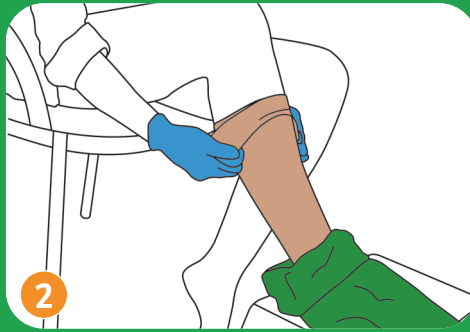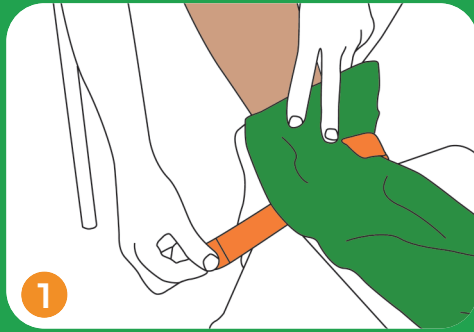


Kiinnitä lenkin yläosa Magnide®
yläosaan magneetin avulla

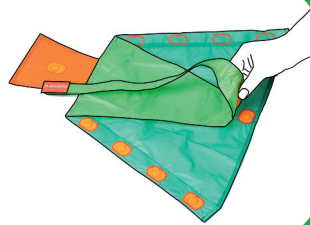


Käännä Magnide® ja aseta se
tasaiselle alustalle

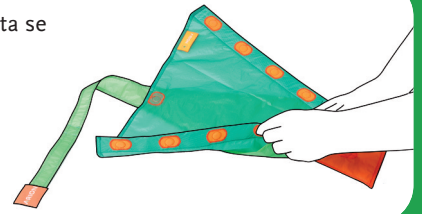

Taita molemmat vihreät sivut
keskelle. Oranssin magneettien
tulee olla kohdakkain
ja osua toisiinsa.

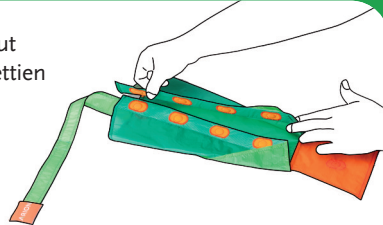

Sulje oranssi läppä (lähellä
varpaita) Magnide® yli siten,
että magneetit osuvat yhteen

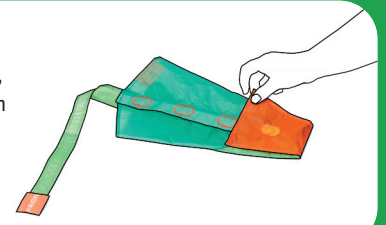

Kompressioterapia on tehty helpommaksi

Arionin apuvälineet kompressiotuotteiden pukemiseen ja riisumiseen

Helppo käyttää

- Minimoi kitkan kompressiotuotteen ja ihon väliltä
- Vähentää kompressiotuotteiden käyttäjän ja hänen apuna olevan henkilön fyysistä rasitusta
- Parantaa kompressiotuotteita käyttävän henkilön itsenäisyyttä

Turvallista käyttää

- Vähentää iho-ongelmien riskiä; erityisen hyödyllinen herkkäihoisilla ja jalkahaavojen yhteydessä
- Edistää kompressiotuotteiden käyttöikää suojaamalla sukkaa kynsiltä ja sormilta
- Auttaa säilyttämään sukan kompression pidempään ja ehkäisee kompressiotuotteen liialliselta venymiseltä

Yksinkertaiset ratkaisut

- Apuväline kaikenikäisille kompressiotuotteille: sukille, sukkahousuille, hihoille ja hanskoille
- Suunniteltu erimuotoisille ja -kokoisille raajoille
- Tukee kompressiohoidon sujuvuutta

Arion Magnide® 2in1

Koot

Tuote- koodi	Koko	Kengän koko	Kengän koko Naiset	Miehet
E01540	Medium	≤ 38	≤ 5,5	≤ 6
E01541	Large	39 - 43	6 - 8	6,5 - 9
E01542	X-Large	≥ 44	≥ 9	≥ 9,5

XL-koko sopii myös erityislevvään
jalkaan (ympärysmitta 28cm asti)



Mikäli tarvitset muita kokoja, Arion pystyy
yksilöimään tuotteita tarpeidesi mukaan.